


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

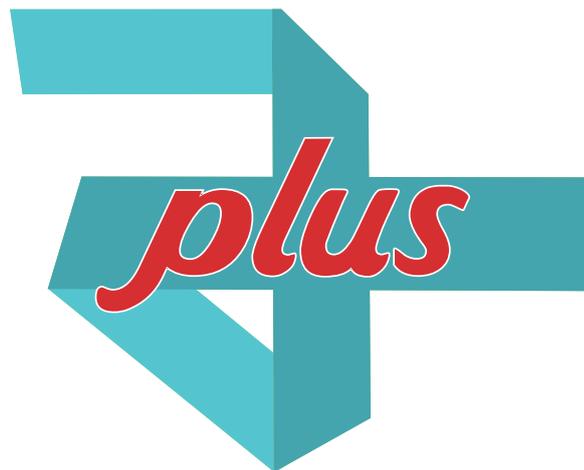

MyClean® S Feuchttuchspender

Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle

Leicht Handhabung

Anwendung:

Den MyClean®S Feuchttuchspender mit einer MyClean®Wipes premium XXL à 70 St./ 90 St., MyClean®Wipes premium L 140St. und MyClean®Wipes soft XXL 90St. trockenen Vliestuchrolle befüllen und anschließend mit 1,5- 2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangabe auf der trockenen Vliestuchrolle beachten).Deckel danach gut verschließen. Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.

Ausführungen:

MyClean® S Feuchttuchspender

| Artikelbeschreibung / Article Description | Größe / Size | Pack.-Inhalt / Content | Art.Nr. / REF | EAN | PZN | Pack / VE |
|---|--------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Feuchttuchspender / wet towel dispenser | 3 L | 1 Spender / 1 dispenser | 79643 | 4046153116430 | 10420068 | 1 |
| Feuchttuchspender / wet towel dispenser | 5 L | 1 Spender / 1 dispenser | 79644 | 4046153116454 | 10420074 | 1 |

Hinweise:

Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Vor der erneuten Befüllung ist der MyClean®S Feuchttuchspender vollständig zu reinigen und zu desinfizieren. Der Spender ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65° spülmaschinenfest.

Symbole:



 Maimed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean S Feuchttuchspender-20140407