


# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet

### MyClean® S Feuchttuchspender

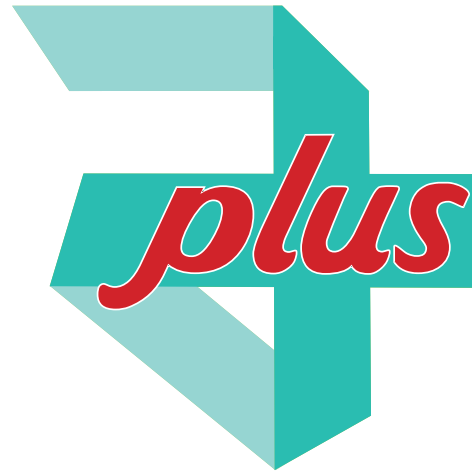

- Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle
- Leicht Handhabung

**Anwendung:** Den MyClean S Feuchttuchspender mit einer MyClean Wipes premium XXL à 70 St./ 90 St., MyClean Wipes premium L 140St. und MyClean Wipes soft XXL 90St. trockenen Vliestuchrolle befüllen und anschließend mit 1,5- 2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangabe auf der trockenen Vliestuchrolle beachten). Deckel danach gut verschließen. Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.

**Ausführungen:** MyClean®S Feuchttuchspender

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Feuchttuchspender / wet towel dispenser	3 L	1 Spender / 1 dispenser	79643	4046153116430	10420068	1
Feuchttuchspender / wet towel dispenser	5 L	1 Spender / 1 dispenser	79644	4046153116454	10420074	1

**Hinweise:** Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Vor der erneuten Befüllung ist der MyClean®S Feuchttuchspender vollständig zu reinigen und zu desinfizieren. Der Spender ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65° spülmaschinenfest.

**Symbole:**



MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany  
TD-MyClean S Feuchttuchspender-20140407