

B. Braun Wipes ECO

Trockene Tuchrolle mit 120 Tüchern für den nachfüllbaren Vliestuchspender



Hygiene

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Wipes ECO

Trockene Tuchrolle mit 120 Tüchern für den nachfüllbaren Vliestuchspender

Tuchrolle mit 120 trockenen Tüchern


Synthetisches Vliesmaterial (100% PET)

Tuchgröße 19 x 36 cm

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel: Hexaquart® forte, Hexaquart® plus/lemon fresh, Melsept® SF, Meliseptol® rapid, Meliseptol® Foam pure

4 Wochen Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung mit den B. Braun Wipes ECO

Im bekannten Spendersystem (Eimer mit blauem Deckel) einsetzbar

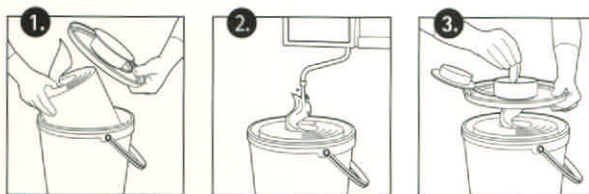

Hinweise zur Anwendung und Dosierung

1. Handschuhe tragen; Vliestuchrolle einsetzen
2. Circa 2,5 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Min. warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist
3. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch werfen; Deckel immer unmittelbar nach Tuchentnahme wieder verschließen; Aufkleber beschriften und aufkleben

Den Tuchrollen liegt ein Aufkleber zum Beschriften des Spenders bei:

B. Braun Wipes ECO
Салфетки флисовые B. Braun ECO

Enthält gebrauchsfertige Reinigungs - / Desinfektionslösung

Produktname: Product name:	LOT:	
Nom du Produit: Название дис. средства:	REF:	19726
	PZN:	10329126
Konzentration: Concentration:	Einwirkzeit: Action time:	haltbar bis: Use by:
Концентрация дис. средства:	Temps d'action: Время действия:	de préf. avant fin: Использовать до:
angesetzt am: Filled on:	Name:	
Date d. rempliss.: Дата розлива:	Nom: ФИО.:	

2014-03-18/0344

B | BRAUN Nachfüllbarer Desinfektionstuchspender / Refillable Fleece Wipe Dispenser / Distributeur rechargeable de lingettes en non-tissé

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit den B. Braun Wipes ECO-Vliestüchern geprüft. Die B. Braun Wipes ECO-Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

Produkt	Lieferform	Art.-Nr.	PZN
B. Braun Wipes ECO	Spendersystem mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)	19162	06067637
	Vliesrolle mit 120 Tüchern	19726	10329126



B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ	Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung
Hexaquart® forte	0,5%	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus	0,5%	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus lemon fresh	0,5%	60 Min.	4 Wochen
Melsept® SF	1,0%	60 Min.	4 Wochen
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.	4 Wochen
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.	4 Wochen