



# Manuelle Aufbereitung von Instrumenten


Wichtig im Umgang mit Desinfektions- und Reinigungsprodukten

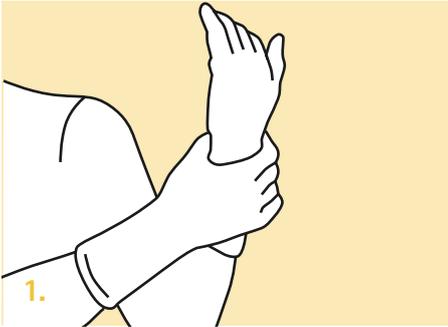


1. Schutzhandschuhe mit langer Stulpe anziehen. Flüssigkeitsdichte Schürze und Schutzbrille anlegen.

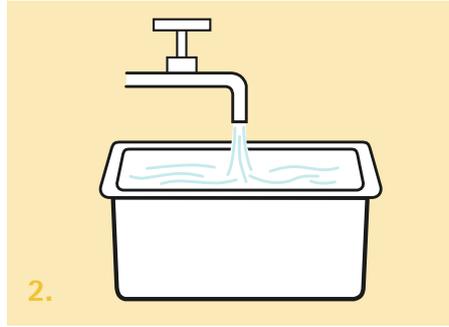


2. Behälter, z. B. Instrumentenwanne, mit kaltem Wasser füllen.\*

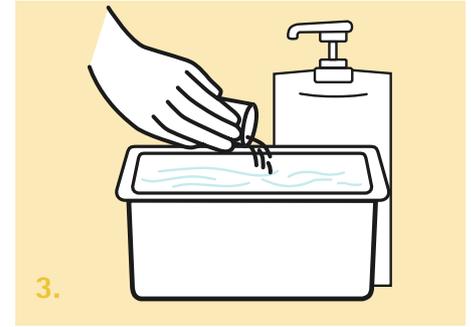


3. Desinfektionsmittel mit geeignetem Dosiersystem abmessen und in das Wasser geben, ggf. bei einem Pulverprodukt Auflösung des Mittels abwarten.

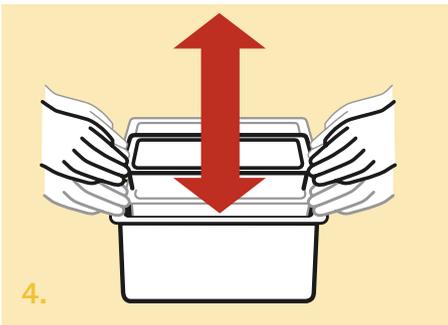

4. Zum Vermischen Sieb auf- und abbewegen.

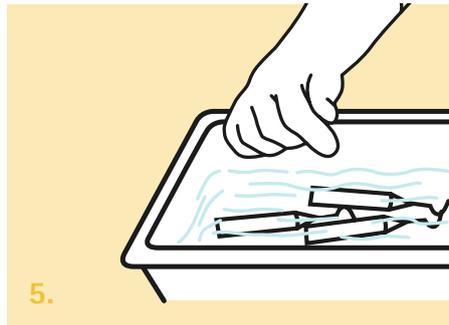

5. Instrumente und Geräte in die Lösung legen, auf vollständige Bedeckung achten.

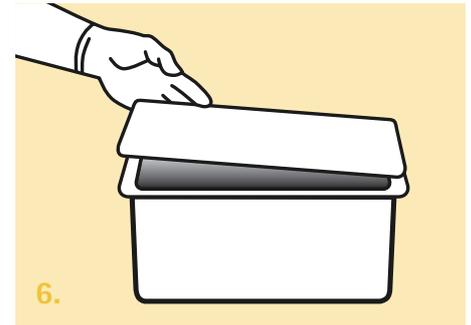

6. Wanne schließen.



7. Einwirkzeit je nach Produkt abwarten. Achtung: Die Einwirkzeit beginnt mit dem jeweils letzten abgeworfenen Instrument.\*\*



8. Instrumente gründlich spülen und trocknen. Trockene Instrumente visuell auf Sauberkeit kontrollieren. Je nach Erfordernissen die Instrumente/Geräte weiter aufbereiten.

\* Je nach Präparat ggf. 2 Wannen für getrennten Reinigungs- und Desinfektionsschritt einsetzen (Zwischenspülung durchführen).

\*\* Falls nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. verbliebene Verschmutzungen mechanisch entfernt werden müssen, ist der Desinfektionsschritt danach zu wiederholen.