



Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in allen Bereichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen.

## schülke wipes

### Unser Plus

- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage
- flusenfrei auf der Oberfläche
- 40, 70, 100 oder 111 wipes pro Rolle
- Medizinprodukt

### Anwendungsgebiete

Feuchttuchspendersystem zum eigenständigen Befüllen von schülke Flächendesinfektionsmitteln. schülke wipes können zur Flächendesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art eingesetzt werden. Folgende Größen sind erhältlich:

- schülke wipes 40 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 70 (28 x 23 cm)
- schülke wipes 100 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 111 (30 x 24 cm)

### Anwendungshinweise

#### Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Öffnen Sie den Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie die entpackte Vliesrolle ein. Ziehen Sie das innerste Tuch ein kleines Stück aus der Mitte heraus. Anschließend geben Sie 2 Liter bei gebrauchsfertigem Produkt und 3 Liter bei Gebrauchslösung aus einem angesetzten Konzentrat langsam spiralförmig über die Vliesrolle. (schülke wipes 40/ 70 = 1,5 Liter.) Nun ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ein und werfen es. Setzen Sie den Deckel auf den Spender auf

und verschließen Sie ihn jetzt, bis er einrastet. Verschließen Sie auch die Schutzkappe des Entnahmesystems sorgfältig. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt. Dokumentieren Sie in der Zwischenzeit, wie auch bei jeder Nachbefüllung, den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das Befülldatum auf dem Etikett, welches jeder Vliestuchrolle beiliegt. Kleben Sie es auf das vorgesehene Feld. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate und Konzentrationen. (Beachten Sie dazu bitte die jeweilige Präparate-Information). Bei sensiblen Medizinprodukten und Oberflächen, die nicht alkoholverträglich sind (z. B. Polster, Displays, Acrylglas, Ultraschallköpfe), empfehlen wir Ihnen die Tränkung der Tücher mit unserem mikrozid® sensitive liquid. Sichtbare Verunreinigungen vor der Desinfektion entfernen. Oberfläche gründlich mit getränktem Vliestuch abwischen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten - ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Die vom Hersteller der verwendeten Desinfektionspräparate gemachten Angaben zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentrationen, Wirkspektrum und etwaigen besonderen Anwendungshinweisen für die sichere Verwendung, sind zu beachten. Die wiederaufbereitbaren Systeme sind nicht geeignet für den Einsatz in Risikobereichen. Hier empfehlen wir die schülke wipes safe & easy bag-in-box / schülke wipes safe & easy bagless. Darüber hinaus sollte auch das eingesetzte Desinfektionsmittelpräparat auf seine Eignung hin für Risikobereiche geprüft werden.



## Besondere Hinweise

### Reinigung und Desinfektion

Bitte achten Sie beim Wischen mit den getränkten Tüchern auf eine vollständige Benetzung der Flächen und nach jeder Tuchentnahme auf ein sorgfältiges Verschließen der Entnahmeöffnung, um einer Austrocknung der Tücher vorzubeugen.

### Wiederbefüllung unter hygienischen Bedingungen

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender zu reinigen und zu desinfizieren. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter [www.schuelke-wipes.de](http://www.schuelke-wipes.de)

Bei allen schülke Produkten beträgt die Standzeit 28 Tagen, ausgenommen: terralin® PAA\*. Weitere Informationen können Sie unserem Beipackzettel entnehmen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
schülke wipes (6x100 Tücher)	1/Karton	119503
schülke wipes (6x70 Tücher)	1/Karton	119505
schülke wipes (6x111 Tücher)	1/Karton	119506
schülke wipes 100/111 Spenderimer	1/Karton	119523
schülke wipes mini 40/70 Spenderimer	1/Karton	119530
schülke wipes (10x40 Tücher)	1/Karton	119532
schülke wipes 70 Spenderbox	1/Karton	119540
schülke wipes 100/111 Spenderbox	1/Karton	119541
schülke wipes 70 Spenderbox (5 x1 Stück)	1/Karton	70000160
schülke wipes 100/111 Spenderbox (5x1 Stück)	1/Karton	70000161
schülke wipes 100/111 Spenderimer (5x1 Stück)	1/Karton	70000162
schülke wipes mini 40/70 Spenderimer (5x1 Stück)	1/Karton	70000163

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung schülke wipes Box	134435
Wandhalterung schülke wipes Eimer	134430

## Verwandte Produkte

- antifact® FF
- antifact® N liquid
- buraton® rapid
- mikrozyd® AF liquid
- mikrozyd® sensitive liquid
- perform® advanced alcohol EP
- perform® classic alcohol EP
- perform® classic concentrate Q-Plus
- terralin® liquid
- terralin® PAA
- terralin® protect

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Customer Care

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Spenderbox

Spenderimer

\*terralin® PAA kann nur in Kombination mit den schülke wipes 40 angewendet werden. Die Standzeit beträgt 12 Stunden.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 4665544  
Fax +41 (0) 44 - 4665533  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
Seidengasse 9  
1070 Wien  
Österreich  
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0  
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)