



Spezialreiniger für zahnärztliche  
Absaugsysteme, Mundspülbecken und  
Abflussleitungen

## aspirmatic® cleaner

### Unser Plus

- Für alle Amalgamabschneider geeignet (z.B. Dürr, Metasys)
- In allen Behandlungseinheiten einsetzbar (z.B. Sirona, KaVo, Castellini, u.a.)
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Löst vorhandene Verschmutzungen
- Schäumt nicht
- wirtschaftlich im Einsatz

### Anwendungsgebiete

aspirmatic® cleaner wird zweimal wöchentlich zur unterstützenden Reinigung des zahnärztlichen Absaugsystems, des Mundspülbeckens und deren Abflussleitungen in Ergänzung zu aspirmatic® verwendet.

### Anwendungshinweise

Durch tägliches Absaugen organischer und anorganischer Substanzen können sich diese in den Schläuchen absetzen, antrocknen oder bei Filterwechsel eine Infektionsgefahr für das Personal darstellen. Um Funktionsstörungen an dem Absaugsystem zu vermeiden und gleichzeitig für hygienische Sicherheit zu sorgen, sollte das aspirmatic®-Programm wie folgt eingesetzt werden:

aspirmatic® cleaner **ein- bis zweimal wöchentlich anstelle der mittäglichen Desinfektion** zur Spezialreinigung einsetzen. Hierzu 2 l Gebrauchslösung aspirmatic® cleaner je Behandlungseinheit in dem Dosierbehälter aspirmatic® system ansetzen (2 l Gebrauchslösung = 1900 ml Wasser und 100 ml Konzentrat hinzufügen). Ca. 1 1/2 Liter durch die Saugschläuche durchsaugen und den verbleibenden 1/2 Liter in das Mundspülbecken kippen. Bis ca. 2 Stunden (z.B. über die Mittagspause) einwirken lassen, damit vorhandene Verschmutzungen gelöst werden. **Im Anschluss an die Einwirkzeit sollte mit Wasser durchgesaugt werden, um gelöste Verschmutzungen aus den Schläuchen herauszuspülen.**

**Wichtig:** aspirmatic® cleaner nicht über Nacht einwirken lassen.

### Anwendungskonzentration:

aspirmatic® cleaner wird in einer Konzentration von 5% eingesetzt. Bei sehr starker Verschmutzung sollte die Dosierung aus 10% erhöht werden.

Noch einfacher:

Berechnen Sie mit unserem DosageCal Ihre gebrauchsfertige Lösung einfach online oder offline unter [www.konzentrarechner-schuelke.de](http://www.konzentrarechner-schuelke.de).



## Produktdaten

Zusammensetzung:  
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 %  
nichtionische Tenside.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	gelb
Flammpunkt	> 100 °C / Methode: ISO 2719
Form	flüssig
pH	ca. 0,9 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Besondere Hinweise

### Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die UVV schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Handschuhen vor. Nach Ablauf des Verfalldatums Präparat nicht mehr anwenden. Konzentrate und Gebrauchslösungen von aspirmatic® und aspirmatic® cleaner nicht mischen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
aspirmatic® cleaner 2 l Flasche	5/Karton	150302

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
aspirmatic® system	183701
Messbecher 500 ml	136101
Messbecher 50 ml	136102

## Verwandte Produkte

- aspirmatic®
- aspirmatic® system

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Customer Care

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 4665544  
Fax +41 (0) 44 - 4665533  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
Seidengasse 9  
1070 Wien  
Österreich  
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0  
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)