

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR STERILE UNTERSUCHUNGS- HANDSCHUHE

Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

PRODUKTBESCHREIBUNG:

**COPOLYMER-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE NACH EN 455.
STERIL, PUDERFREI, BEIDHÄNDIG PASSEND, FÜR DEN
EINMALGEBRAUCH.**

Stellen Sie vor dem Gebrauch fest, ob

- die Art des Handschuhes für die Anwendung geeignet ist.
- der Handschuh Ihrer Handgröße entspricht.
- das Haltbarkeits- und Sterilisationsdatum auf die Verpackung gedruckt ist und nicht überschritten wurde.
- die sterile Peel-Verpackung intakt ist.

Anwendung:

- Vor dem Anziehen desinfizieren Sie bitte Ihre Hände und lassen diese gut trocknen (chirurgische Händedesinfektion).
- Öffnen Sie die Peel-Verpackung.



WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

- Entnehmen Sie das Faltpapier und klappen Sie es auf.



- Führen Sie Ihre Hand in den noch am Papier haftenden Handschuh.



- Ziehen Sie den Handschuh vom Papier ab.



- Achten Sie beim Anziehen bitte darauf, den Handschuh nicht (z. B. durch lange/spitze Fingernägel) zu beschädigen.
- Achten Sie vor der Anwendung darauf, alle Schmuckstücke abzulegen, die den Handschuh beschädigen könnten.
- Überdehnen Sie den Handschuh nicht, da sonst die Gefahr besteht, dass dieser reißt.

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsRISIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE www.meditrade.de.







Hinweis:

- Nach dem Tragen des Handschuhes empfehlen wir Ihnen unsere „**Gentle Med Cremelotion**“ als prophylaktischen Schutz vor Hautirritationen und als sinnvolle Ergänzung zu medizinischen Einmal- und Schutzhandschuhen.
- Besonders empfindlichen Anwendern empfehlen wir unsere Zwirnhandschuhe mit unseren Einmalhandschuhen zu kombinieren, denn sie bieten noch einen zusätzlichen Schutz für strapazierte Hände und gegen Kontaktallergien.









Warnhinweise:

- Nur für den Einmalgebrauch! Bei Mehrfachverwendung ist die Barriere- und Schutzwirkung des Handschuhs nicht mehr gewährleistet – Infektionsgefahr!
- Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5°C und über 35°C vermeiden!

Beschreibung der je nach Produkt verwendeten Symbole auf der Verpackung:

	Nur zum Einmalgebrauch
	min. und max. Temperaturbereich
	Mindesthaltbarkeit
	Bestellnummer
	Hersteller
	Lot / Chargennummer

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsRISIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE www.meditrade.de.

	Herstelldatum
	vor Hitze schützen
	vor Nässe schützen
	Sterilisiert durch Bestrahlung
	CE-Kennzeichnung
	nur geschlossene und unbeschädigte Packungen verwenden
	Information
	Achtung Gebrauchsanweisung beachten

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsRISIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE www.meditrade.de.