



Kalt-Warmkompressen

Einleitung

Kalt-Warm Kompressen bestehen aus einem mit Gel befüllten Beutel, der Kälte bzw. Wärme speichert.

Gel

Auf Wasserbasis.

Beschreibung

Kalt-Warm Kompressen werden eingesetzt bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen und Verbrennungen. Auch bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen anwendbar. Für jeden Einsatzzweck gibt es die richtige Größe und Form.

Verwendung als Kältekomresse

Komresse ca. 2 Stunden ins Gefrierfach legen – danach ist die Komresse einsetzbar.

Um Kälteverbrennungen zu vermeiden, sollte zwischen Komresse und Haut ein dünnes Tuch gelegt werden. sog. Vliesstoffhüllen sind für jede Kompressengröße lieferbar.

Verwendung als Wärmekomresse

Komresse ca. 5 – 10 Minuten in ca. 80 Grad heißes Wasser legen. Auch hier zur Vermeidung von Verbrennungen ein dünnes Tuch oder ein feuchtes Handtuch zwischen Haut und Komresse legen.

Warnhinweise

- nur zur äußerlichen Anwendung
- max. Anwendungszeit 20 Min.
- mind. 30 Min. Pausen zwischen den Anwendungen
- bei Herz- Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden
- Mikrowellen geeignet

Beschädigte Kompressen keinesfalls mehr verwenden.
Entsorgung durch den Hausmüll.

Achtung: Kalt-Warm Kompressen sollen nur für ihren vorgesehenen Einsatzzweck benutzt werden.

Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold

Fon: (+49) 05424 - 21 64 40

Fax: (+49) 05424 - 21 64 34

Mail: info@cundv.de

www.cundv.de

Rechnungsanschrift:

C+V Pharma-Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

D-33775 Versmold

Tel: 05423 - 94 00 17

Fax: 05423 - 94 00 19

Verwaltung:

C+V Pharma-Depot GmbH

Nordel 1

D-49176 Hilter

Tel: 05424 - 21 64 40

Fax: 05424 - 21 64 34

Commerzbank AG

Konto-Nr. 545 04 40

BLZ: 265 400 70

IBAN: DE91265400700545044000

SWIFT: COBADEFF265

HRB 5104

Registergericht Gütersloh

Geschäftsführerin: Liesel Fichter

St-Nr. 351/5711/0299

Ust-ID-Nr: DE 186 138 842





Kalt/Warmkompressen		Gewicht	VPE
7,5 x 13 cm	blau o. transparent	75 g	50 Stck.
7,5 x 35 cm	blau o. transparent	280 g	40 Stck.
7,5 x 52 cm	blau o. transparent	400 g	25 Stck.
13 x 14 cm	blau o. transparent	140 g	50 Stck.
12 x 29 cm	blau o. transparent	420 g	25 Stck.
16 x 26 cm	blau o. transparent	500 g	20 Stck.
21 x 38 cm	blau o. transparent	960 g	6 Stck.
30 x 40 cm	blau o. transparent	1450 g	6 Stck.

