

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® Wipes soft Trockene Vliestuchrollen

- Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem
- Mit glatter Oberfläche

Anwendung: MyClean® Wipes soft trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5 - 2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. MyClean® Wipes soft trockene Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für: MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung (alle 4-Felder-Test), MyClean® DS A.

Ausführungen: MyClean® Wipes soft

Artikelbeschreibung	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Vliestuchrolle, trocken, soft L	28 x 15 cm	140 Blatt	79655	4046153120956	11141169	8
Vliestuchrolle, trocken, soft XXL	28 x 30 cm	70 Blatt	79648	4046153118564	10843834	8
Vliestuchrolle, trocken, soft XXL	28 x 30 cm	90 Blatt	179646	4046153117031	10388086	8

Hinweise: Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, fertigen Gebrauchslösung.

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit: Maximal 28 Tage (fertige Gebrauchslösung)

Symbole:   



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-Wipes-soft-20170306