



Manuelle Instrumentenreinigung

DESCO CLEANER

Reinigungspulver für Instrumente

- herausragende Reinigungskraft
- besonders für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet
- schnell wirksam



Produktbeschreibung

DESCO CLEANER ist ein alkalischer Pulverreiniger zur selbsttätigen und äußerst gründlichen Schnellreinigung von Instrumenten und Geräten aus Metall, Kunststoff, Keramik, Glas und Porzellan. Bei hoher Schmutzbelastung mit Eiweiß- und Blutresten ist DESCO CLEANER der ideale Pulverreiniger für alle medizinischen Bereiche und Labors.

Anwendungsgebiete

DESCO CLEANER kann angewendet werden bei chirurgischem Instrumentarium wie Nierenschalen, Pinzetten, Scheren und Zangen, bei Inhalierapparaten, Kunststoffmaterialien, Laborgläsern, Mörsern, Porzellan, Schläuchen, Standflaschen, Waschschüsseln, Zählkammern und zahnärztlichem Instrumentarium. Nicht anwenden bei alkaliempfindlichen Materialien.

Anwendung

Zu reinigendes Material sofort nach Gebrauch in die Reinigungslösung einlegen und 10-20 min einwirken lassen. Sämtliche zu reinigende

Flächen und Hohlräume müssen vollständig benetzt sein. Bei hartnäckiger Verschmutzung die Dosis und/oder die Einwirkzeit erhöhen. Die Lösung wird je nach Grad der Verschmutzung erneuert. Die Instrumente sind nach der Entnahme aus der Lösung gründlich mit Wasser abzuspülen. DESCO CLEANER eignet sich auch für den Einsatz in Ultraschallgeräten.

Anwendungshinweise

DOSIERUNG:

je nach Verschmutzung 0,5 % - 1 %

DOSIERANLEITUNG:

Zur Herstellung einer 0,5 % - igen Lösung:

1 Messlöffel auf 6 Liter Wasser

Zur Herstellung einer 1,0 % - igen Lösung:

1 Messlöffel auf 3 Liter Wasser

Zusammensetzung

100g Lösung enthalten:

nichtionische Tenside (< 5 %), anionische Tenside (5 - 15%), Phosphate (> 30 %)

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. EU-Detergenzienverordnung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.
DESCO CLEANER	Dose	1 kg	6	00-115-010
	Eimer	5 kg	1	00-115-050



pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

