

DAS PLUS AN SICHERHEIT FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionssicherheit auf
allen abwaschbaren Flächen, selbst
in Risikobereichen.

- ▶ Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®
- ▶ Breites Wirkspektrum und
hervorragende Reinigungsleistung
- ▶ VAH- und RKI-gelistet



Glucoprotamin®

Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Auf Basis des patentierten Wirkstoffes Glucoprotamin®	Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit
Hohe Materialverträglichkeit	Für alle Arten von Oberflächen und Böden geeignet

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT
	%	ml/L	Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
	2	20	15
Flächendesinfektion gemäß VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	1	10	30
	0,5	5	60
	0,25	2,5	240
RKI-Liste			
Flächendesinfektion Wirkungsbereich A	8	80	360
IHO-Viruzidie-Liste			
Prüfung gemäß DVV mit/ohne Belastung			
Begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,25/0,5	2,5/5	60/15
Rotavirus	0,5	5	15
Adenovirus	1	10	60
Papova-Viren/Polyomavirus SV40	0,5/1	5/10	60/30
EURO-Normen			
EN 1276 (bakterizid, mit Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13697 (bakterizid, mit/ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13697 (levurozid, mit/ohne Belastung)	0,25	2,5	15
EN 1650 (levurozid)	0,25	2,5	15
Zusätzliche Wirksamkeiten			
TBC**	0,25/0,5/1	2,5/5/10	60/30/15
MRSA	0,5	5	60
Influenza Viren (H1N1, A/H5N1)***	0,5	5	15
Tuberkoluzid + Mykobakterizid****	1,5/3	15/30	60/30

* gem. RKI-Empfehlung 1/2004 ** Suspensionstest mit Mycobacterium terrae (DGHM 1996)
 *** aufgrund begrenzter Viruzidie **** Flächentest gem. DGHM 2001



Oberflächendesinfektion
für Medizinprodukte

CE 0297



Flüssiges Desinfektionsmittel-
konzentrat zur Desinfektion
von Flächen aller Art.
D BIOZID N-11720

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:
26 g Glucoprotamin®

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Plus Dosierbeutel	400 x 200 ml	30 125 20
Incidin® Plus Nachfüllflasche	3 x 2 L	30 115 10
Incidin® Plus Kanister	6 L	30 115 20
Incidin® Plus Kanister	30 L	30 115 30
Incidin® Plus Fass	200 L	30 115 40

WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0)2173-599-0
www.ecolabhealthcare.de