

Incides® N



Das Tuch für die
alkoholische Schnelldesinfektion



- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- angenehmer Duft

Incides® N



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Flächen aller Art

Unsere Leistung

Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien (auch TB) und Pilze. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 und wirksam gegen Adeno-, Papova- sowie Rotaviren.

Aldehydfrei

Besonders kurze Einwirkzeit

Gebrauchsfertige Tücher

Ausgewogene, synergistische Formulierung verschiedener Alkohole

Sympathische Duftnote

Erhältlich in praktischen Nachfülldosen

Dermatologisch begutachtet

Materialverträglichkeit umfangreich geprüft

Ihr Nutzen

Hohe Desinfektionssicherheit auf allen alkoholbeständigen Flächen

Hervorragende Anwenderverträglichkeit

Schnelle Sicherheit für Patient und Personal

Einfache Handhabung, sofort einsetzbar

Schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung durch Alkohole

Angenehme Arbeitsbedingungen

Reduziert den Verpackungsmüll

Hohe Anwendersicherheit

Einsetzbar bei: Metallen, Kunststoffen und alkoholbeständigen lackierten Oberflächen, wie z. B. Behandlungseinheiten

Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material, Hand- und Winkelstücke in der Zahnarztpraxis, Griffstücke, etc., sowie von kleinen alkoholbeständigen Flächen aller Art. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Anwendungsempfehlung

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Gegenstände abwischen, nicht nachwischen. Dose wieder verschließen.

Zusammensetzung

in 100 g Tränklösung sind enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol.

Mikrobiologische und virologische Prüfergebnisse

Unverdünnt anzuwenden

	Einwirkzeit*
Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe und in der allg. Praxis nach DGHM	5 Min.
Kurzzeitdesinfektion nach DGHM-Methode	1 Min.
Flächendesinfektion gegen TB	5 Min.
begrenzt viruzid** (inkl. HIV, HBV und HCV)	1 Min.
Wirksamkeit gegen · Adenoviren · Papovaviren	5 Min. 10 Min.
Wirksamkeit gegen Rotaviren	1 Min.

* Ergebnisse der Prüfung der Tränklösung
** gemäß RKI-Empfehlung 01/2004

Nachfüllpackung



Incides® N ist auch in der praktischen Nachfüllpackung erhältlich.

Gebindeformen Incides N

Dose mit 90 Tüchern Karton à 6 Dosen **IDT 6**

Nachfüllpack mit 90 Tüchern Karton à 5 Nachfüllpacks **IDT 5**

Gutachten

Umfangreich geprüft: mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Für den Vertrieb Schweiz:

BAG T Nr.: 610184

GK: frei

Ecolab GmbH & Co. OHG
Postfach 130406
D-40554 Düsseldorf
Telefon +49 2 11 98 93-0
Telefax +49 2 11 98 93-3 84

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Telefon +43 17 15 25 50-2800
Telefax +43 17 15 25 50-2850

Ecolab GmbH
Kriegackerstraße 91
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 61 4 66 94-66
Telefax +41 61 4 66 94-55

www.ecolab.com

ECOLAB®