

X-LINE WIPES FEUCHTWISCHSYSTEM

FEUCHTTUCHSPENDER INKLUSIVE TUCHROLLE ALS SET



Mit saugfähiger, reißfester und fusselfreier Tuchrolle

Bei dem X-LINE WIPES FEUCHTWISCHSYSTEM handelt es sich um ein wiederbefüllbares Spendersystem zur Tränkung von Tüchern mit Desinfektions- oder Reinigungsmitteln.

Ideal für die schnelle und einfache Desinfektion oder Reinigung von wischfesten Oberflächen in medizinischen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Altenheimen, Fitnesscentern sowie in Lebensmittelbereichen, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Besonders für Bereiche, die mehrmals täglich desinfiziert oder gereinigt werden müssen. Auch ideal für die Händedesinfektion geeignet.

Der wiederverschließbare Spenderimer ist universell einsetzbar und ermöglicht eine sichere und einfache Entnahme. Durch das geschlossene System wird die Lösung vor Kontamination und Verdunstung geschützt.

- Für alle wischfesten Oberflächen
- Einfache Handhabung
- Universell einsetzbar
- Wiederbefüllbares System
- Sicheres und anwenderfreundliches System
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Haltbarkeit nach Tränkung 28 Tage

Größe Spender	Artikel-Nr.	VPE
19,5x19,5x22 cm	01109	4 Set's

Im Lieferumfang mit Art.-Nr. 01109 ist enthalten:

1 Feuchttuchspender Volumen 5 Liter

1 weißem Deckel und 1 Tuchrolle mit 350 Blatt



VORBEREITUNG

1. Zum Schutz der Tuchrolle vor Kontamination Handschuhe anziehen.
2. Die Tuchrolle mit Handschuhen aus der Verpackung nehmen.
3. Die Tuchrolle hineinstellen und das erste Tuch herausziehen.
4. Ca. 2,5-3 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung in der gewünschten Konzentration dosieren oder gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel verwenden.
Für eine Verdünnung wird empfohlen destilliertes oder entmineralisiertes Wasser zu benutzen, um Streifen an der Oberfläche zu verhindern.
5. Desinfektionslösung in gewünschter Anwendungskonzentration einfüllen.
6. Das erste Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Spender mit dem Deckel verschließen.
Dann 30-60 Minuten warten, sodass die Tücher durchtränkt sind.
7. Das Sicherheitsetikett beschriften und aufkleben, um das Haltbarkeitsdatum festzuhalten.
8. Die Tücher können nach der Tränkung 28 Tage verwendet werden.

ANWENDUNG

Gegenstände und Flächen bis zur vollständigen Benetzung sorgfältig abwischen.
Einwirkzeit und Konzentration des Desinfektionsmittels beachten.

WIEDERBEFÜLLUNG

1. Zum Schutz der Tuchrolle vor Kontamination Handschuhe anziehen.
2. Vor erneutem Befüllen, Tuch- und Flüssigkeitsreste entsorgen.
3. Neuer oder restentleerer Spender mit alkoholischem Reinigungsmittel reinigen.
4. Spender mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch 1 Minute desinfizieren.
5. Alle Teile gründlich trocknen lassen und wieder befüllen.