

# IIR 3 PLY DISPOSABLE FACE MASK IIR 3 PLY MUND-NASEN-SCHUTZ

NON-STERILE, DISPOSABLE, WITH ELASTIC EARLOOPS

NICHT STERIL - EINWEGARTIKEL

EN14683:2019

## Product description/Produktbeschreibung:

Non-sterile, Disposable, Face mask/Nicht steril, Einwegartikel, Mund-Nasen-Schutz

Dimension/Maße: 17,5 x 9,5 cm

Packaging/Verpackung: 25 pieces per bag

Production date/Herstellungsdatum: 2020-05-13

Product validity/Haltbarkeit: 24 months/monate

Product executive standard/Herstellungsstandard: EN14683:2019 IIR



**EN** Put the side with the nose clip up (blue side outward) and place the elasticated loops behind your ears;

**DE** Die Seite mit dem Nasenclip (blaue Seite nach außen) sollte nach oben zeigen. Bringen Sie die elastischen Gummibänder hinter den Ohren an.



**EN** Place the top of the mask just below the bridge of the nose and gently press the nose clip to make it fit;

**DE** Legen Sie die Oberkante der Maske unterhalb des Nasenbeins auf und drücken Sie den Nasenclip vorsichtig an, so dass die Maske gut anliegt.



**EN** Press the mask with your hands on both sides at the same time and move from top to bottom to create a tight fit to the face.

**DE** Drücken Sie die Maske mit den Händen auf beiden Seiten zugleich an und bewegen Sie die Hände dabei von oben nach unten, so dass die Maske eng am Gesicht anliegt.

**DO NOT REUSE - THIS IS A SINGLE USE DISPOSABLE PRODUCT**  
**NICHT WIEDERVERWENDEN - DIES IST EIN EINWEGPRODUKT**



**EN** Storage: Store in a cool, well ventilated place with relative humidity <80%. Avoid direct sunlight. **DE** Lagerung: Für optimalen Schutz sollten Sie sicherstellen, dass die Maske unter dem Kinn und bis zum Hinterkopf gut befestigt ist.



EN14683:2019

8



Manufacturer/Hersteller: Guangdong For You Essentials Manufacturing Co., Ltd. Address: 6 Shanhua Road, Yanghe Town, Gaoming District, Foshan City, Tel: 400-833-7238.

CE-rep: Lotus NL BV, Koningin Julianaplein 10, Den Haag, Netherlands  
Distributed by ESSENZA HOME ([www.ESSENZAHOME.com](http://www.ESSENZAHOME.com))