

PP-Vlies, 35 g

Einwegschuttkittel


Disposable gown / Blouse de protection jetable
à usage unique



Hergestellt am:
09/2020

Haltbar bis:
09/2022

IMEX-CO GmbH
Brunnenweg 9
64331 Weiterstadt
Festnetz +49 6150 8308089
Mobil +49 175 9142666
WhatsApp +49 175 9142666
Mail info@imex-co.de

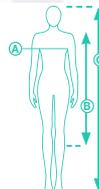

Körpermaße / Body measurements / Mesures du corps

(cm)	A	B	C
Größe	Umfang	Kittellänge	Körpergröße
S	84–92 cm	120 cm	164–169 cm
M	92–100 cm	120 cm	169–175 cm
L	100–108 cm	130 cm	175–181 cm
XL	108–116 cm	130 cm	181–188 cm
XXL	116–124 cm	140 cm	188–195 cm

Modell /
Model / Modèle

KS - 200
Level I
PAUL
GNC - 2207

L/XL

Produktstandards /
Standards of the product /
Normes de produits

EN 13795-1
ISO 13938-1
ISO 13485
FDA



Allgemein / General

Der Schuttkittel PAUL besteht aus weichem Spin-Vliesstoff (35 g). Der Kittel ist robust, atmungsaktiv und garantiert dabei eine hohe Barrierewirkung gegenüber gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern. Mit Bindegürtel und Strickbündchen an den Ärmeln, dazu Klettverschluss am Hals.

The protective gown is made of soft Spin-Vliesstoff (35g). The gown is robust, breathable and guarantees a high barrier effect against dangerous particles and liquid splashes. With tie belt and knitted cuffs on the sleeves, plus Velcro fastener on the neck.

Anwendung Anziehen / How to put it on

- Entnehmen Sie den Schuttkittel mit sauberen und desinfizierten Händen
- Schlüpfen Sie jeweils mit dem linken und rechten Arm in die Ärmel und ziehen Sie den Kittel über die Schultern
- Wickeln Sie den Kittel um den Rücken und schließen Sie ihn mittels der Verschlüsse im Nacken- und Taillienbereich

- Remove the protective gown with clean and disinfected hands
- Slip your left and right arm into the sleeves and pull the gown over your shoulders
- Wrap the gown around your back and close it using the fasteners in the neck and waist area

Anwendung Ausziehen / How to get it off

- Schuttkittel mit beiden Händen in Höhe des Schlaufenbundes (Bauchbereich) links und rechts der Hüfte fest greifen und unter ständigem Zug nach vorne ziehen, bis sich die Schlaufen öffnen
- Schuttkittel mit beiden Händen in Schulterhöhe fest greifen und mit Zug nach vorne ziehen, bis sich die Schlaufe öffnet
- Schuttkittel mitsamt Handschuhen auf links abstreifen und in patientenspezifischen Abwurf entsorgen
- Bitte achten Sie darauf, dass der Kittel möglichst ohne Verwirbelung komprimiert und entsorgt wird

- Grasp the protective gown firmly with both hands at the level of the loop band (stomach area) on the left and right of the hips and pull it forward with constant pull until the loops open
- Grasp the protective gown firmly with both hands at shoulder height and pull it forward with a pull until the loop opens
- Take off the protective gown and gloves inside out and dispose of it in a patient-specific waste bin
- Please ensure that the gown is compressed and disposed of without any turbulence

Symbole



Nicht waschen
Do not wash
Ne pas laver



Nicht bügeln
Do not iron
Ne pas repasser



Nicht in Trockner
Not in the dryer
Pas dans la sècheuse



Nicht chemisch reinigen
Do not dry clean
Ne pas nettoyer à sec



Nicht bleichen
Do not bleach
Ne pas javelliser



Nicht wiederverwenden
Do not reuse
Ne pas réutiliser