

MoliCare® Premium Mobile

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Bei MoliCare® Premium Mobile handelt es sich um Einweghosen zur Inkontinenzversorgung.

Die Produkte eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung. Die Produkte sind für die Verwendung bei mobilen und eingeschränkt mobilen Patienten sowie bei unruhigen oder dementen Patienten ausgelegt. Die Produkte sind ausschließlich für den Einmalgebrauch geeignet und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden.

Die Produkte können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

Anwendung/Indikation

MoliCare® Premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung.



MoliCare® Premium Mobile

Artikelnummern*

Verpackung	XS	S	M	L	XL	
Hüft-/Taillenumfang (cm)	45–70	60–90	80–120	100–150	130–170	
P14	5 Tropfen / grün	-	915861	915852/915862 / 915812	915853/915863 / /915813	915854/ 915855
	6 Tropfen / blau	915840	915831/ 915841	915832/915842 / 915822	915833/915843 / /915823	915834/ 915844
	8 Tropfen / violett	-	915871/ 915881	915872/ 915882	915873/ 915883	915874/ 915875
	10 Tropfen / grau	-	-	915878/ 915884	915879/ 915885	915880/ 915886
P30	5 Tropfen / grün	-	915644	915642	915643	915645
	6 Tropfen / blau	915638	915634	915635	915636	915637
	8 Tropfen / violett	-	915639	915640	915641	915646
	10 Tropfen / grau	-	-	915652	915647	915649
P2	5 Tropfen / grün	-	915615	915616	915617	915648
	6 Tropfen / blau	915618	915619	915620	915621	915622
	8 Tropfen / violett	-	915623	915624	915625	915656
	10 Tropfen / grau	-	-	915825	915826	915829

*Möglicherweise ist das volle Sortiment nicht in allen Ländern erhältlich.

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Premium Mobile entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

MoliCare® Premium Mobile

Leistungsmerkmale des Produkts

MoliCare® Premium Mobile 5 Tropfen / grün:

Merkmale	Einheit	XS	S	M	L	XL
Gesamtgewicht:*	[g]	-	54	58	72	77

* $\leq \pm 10\%$ Gewichtsabweichung

MoliCare® Premium Mobile 6 Tropfen / blau:

Merkmale	Einheit	XS	S	M	L	XL
Gesamtgewicht:*	[g]	67	69	78	95	105

* $\leq \pm 10\%$ Gewichtsabweichung

MoliCare® Premium Mobile 8 Tropfen / violett:

Merkmale	Einheit	XS	S	M	L	XL
Gesamtgewicht:*	[g]	-	82	92	111	116

* $\leq \pm 10\%$ Gewichtsabweichung

MoliCare® Premium Mobile 10 Tropfen / grau:

Merkmale	Einheit	XS	S	M	L	XL
Gesamtgewicht:*	[g]	-	-	105	117	122

* $\leq \pm 10\%$ Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Hauptteil	Polypropylen-Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, weiß
Rückseite:	Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, weiß, atmungsaktiv
Saugkern (3-lagig):	1. Lage: Zellstoff* 2. Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage: Zellstoff*, Curly Fiber *elementarchlorfrei gebleicht
Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
Bündchen:	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
Elastikfäden:	Elastikfäden auf Polyurethan-Basis für Beinabschluss, Innenbündchen, Taillen- und Hüftbereich
Nässeindikator:	Wasserlösliche Tinte

MoliCare® Premium Mobile

Produktmerkmale

Abmessungen	XS	S	M	L	XL
Gesamtlänge*:	730	730	800	900	960
Gesamtbreite*:	550	550	660	810	900
Schrittbreite*:	200	200	220	220	210
Länge Saugkern*:	490	490	490	580	580
Breite Saugkern*:	180	180	18	180	180
Breite Saugkern im Schritt*:	140	140	140	140	140

* ≤ ± 10% Maßabweichung

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code

z. B.:  9 001 02 82 2
 Jahr 201X Interner Schlüssel Interner Schlüssel Interner Schlüssel Kumulierte Prüfwert

Herstellungsdatum

z. B.:  2019 08 07
 Jahr Monat Tag

Verfalldatum

z. B.:  2024 08 01
 Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



Letzter Überarbeitungsstand: 2019-10-04