



FLÄCHEN-
DESINFIZIATIONSMITTEL

Lysoformin® Plus-Schaum

Schnellwirkender Desinfektions- und
Reinigungsschaum für medizinisches Inventar

Désinfectant moussant nettoyant rapide
pour les surfaces et l'équipement médical



CE0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Lysoformin® Plus-Schaum

Gebrauchsfertig
Zur gewerblichen Verwendung

BAuA: Reg-Nr. N-76300 | CHZN 6932

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lysoformin® Plus-Schaum enthalten:
0,18 g Polyhexamethylene biguanide · HCl,
0,46 g Bis-(3-aminopropyl) dodecylamine,
0,10 g Didecylidimethylammoniumchloride, Duftstoffe

ANWENDUNGSGEBIETE

Schnellwirkendes Desinfektionsmittel für medizinisches Inventar im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG). Auch für andere wasserbeständige Flächen geeignet.

- Desinfektion und Reinigung von Flächen (auch von Medizinprodukten) in einem Arbeitsgang
- Anwendung nach Aufbereitungsanweisung des Medizinprodukteherstellers

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Gebrauchsfertige Lösung. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände einschäumen und einwirken lassen. Dann mit einem sauberen, feuchten Tuch nachwischen oder Lysoformin® Plus-Schaum unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen.

Einwirkzeit: 5 Minuten.

begrenzt viruzid* inkl. HBV/HCV/HIV	5 min
Polyomavirus (SV 40)	15 min

* gem. RKI-Empfehlung 2017.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Sprühnebel bzw. Schaum nicht einatmen, ggfs. Atemschutz mit geeigneten Partikelfilter tragen.
- Beim Umgang mit dem Präparat geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.

EIGENSCHAFTEN

- bekämpft Bakterien, Pilze (Hefe) und behüllte Viren
- optimale Benetzung der Flächen und damit schonende und sichere Desinfektion
- einfache Handhabung, sofort einsetzbar
- frischer Geruch

BESONDERE HINWEISE

- Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch:
Sollte das Präparat Lysoformin® Plus-Schaum durch unsachgemäßen Gebrauch in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden. Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen reichlich mit Wasser spülen.
- Sonstiges: Gegenstände/Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind nach abgeschlossener Desinfektion mit Trinkwasser nachzuspülen!
- Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1-Liter-Flasche mit Schaumkopf	Art.-Nr. 2505
2 x 5-Liter-Kanister	2509

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerions aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81

Mode d'emploi

A lire attentivement!

Lysoformin® Plus-Schaum

Prêt à l'emploi
Pour usage professionnel

BAuA: Reg-Nr. N-76300 | CHZN 6932

PRINCIPES ACTIFS

100 g de Lysoformin® Plus-Schaum contiennent:
0,18 g Polyhexaméthylène biguanide · HCl,
0,46 g Bis-(3-aminopropyl) dodécylamine,
0,10 g Chlorure de didécyl diméthyl ammonium, Parfums

DOMAINES D'APPLICATION

Désinfection rapide de l'équipement médical conforme à la loi sur les dispositifs médicaux. Egalement indiqué pour la désinfection des surfaces lavables.

- désinfection et nettoyage des surfaces (et des dispositifs médicaux) en une seule étape
- utilisation conformément aux instructions de préparation du fabricant des dispositifs médicaux

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Solution prête à l'emploi. Pulvériser la mousse sur les surfaces et objets à désinfecter et laisser agir. Puis éliminer la mousse avec un chiffon propre et humide, ou appliquer Lysoformin® Plus-Schaum concentré sur un chiffon à usage unique et essuyer la surface.

Temps de contact: 5 minutes.

Virucide vis-à-vis des virus enveloppés*	
HBV/HCV/HIV inclus	5 mn
Polyoma virus (SV 40)	15 min

* conf. aux recommandations du RKI de 01/2004.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

- Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et/ou la mousse. Porter un appareil respiratoire doté d'un film à particules approprié si nécessaire.
- Porter des gants et des vêtements protecteurs pendant la manipulation du produit!
- Ne plus utiliser une fois la date de péremption atteinte!
- Conserver au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé et hors de la portée des enfants.

PROPRIÉTÉS

- lutte contre les bactéries, les fungus (les levures) et les virus
- bon pouvoir mouillant et bonne compatibilité avec les surfaces; désinfection assurée
- manipulation facile, utilisation immédiate
- odeur fraîche

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

- Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte: Au cas où Lysoformin® Plus-Schaum viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins, etc.), consulter un médecin immédiatement. En cas d'ingestion, diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau raisonnable au patient. En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- Observations particulières
Les objets/les surfaces en contact avec les produits alimentaires doivent être rincés à l'eau potable après la désinfection.
- Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Lisez l'étiquette et le mode d'emploi.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

12 x 1 litre vaporisateur avec flacon	no. d'article 2505
2 x 5 litres bidon	2509



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Postfach 444, CH-5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch