



**QUICKSTART**  
**15 MIN.**  
FUNKTION\*

**STANDZEIT**  
**6 WOCHEN**  
GEPRÜFT\*

## Flächendesinfektion

# one system basic

## Einweg Vlietuchspendersystem zur Befüllung mit Desinfektionsmittel

- Kompakte Flexi-Verpackung mit erhöhter Standfestigkeit für besonders einfache Handhabung und Füllstandskontrolle
- Befüllt mit DESOTEX-Vlietüchern
- Einsatz nach 15 Minuten - auch in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko - bei 6 Wochen Standzeit



### Produktbeschreibung

**ONE SYSTEM BASIC** ist ein Einweg-Vlietuchspendersystem zur Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. **ONE SYSTEM BASIC** ermöglicht eine praxisnahe und zeitsparende Anwendung. Der besonders handliche und kompakte Einweg-Vlietuchspender ist einfach, sicher und effizient, sowie schnell einsatzbereit, da bereits mit einer passenden **DESOTEX®** Vlietuchrolle vorbelegt. Der Anwender kann das System direkt mit dem gewünschten Desinfektionsmittel tränken und nach kurzer, 15-minütigen Vorränkzeit einsetzen. Die Konstruktion und Handhabung basiert auf dem gewohnten Vlietuchspender, jedoch in einer flexiblen und platzsparenden Bauweise.

**ONE SYSTEM BASIC** ist nur für die einmalige Anwendung bestimmt. Es benötigt keine Aufbereitung nach Ende der verlängerten Standzeit von 6 Wochen. Nach Aufbrauchen und Entsorgung eventuell Restmenge kann das System dem Recycling zugeführt werden.

Desinfektionsmittel	Standzeit 42 Tage*	4-Felder-Test <sup>1,2</sup>	Verwendung auch in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko <sup>2</sup>
OPTISAL® PLUS	✓	✓	✓
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓
OPTISAL N	✓	✓	✓
CLEANISEPT®	✓	✓	✓
DESCOCEPT AF	✓	✓	✓
DESCOCEPT FORTE	✓	✓	✓

<sup>1</sup> geprüft mit allen obligatorischen Testkeimen der EN 16615 (Bakterizidie/Levurozidie)

<sup>2</sup> gem. Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“: Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, Hyg Med 2014; 39 – 9.


\*Im Vergleich zu anderen gängigen Flächendesinfektionsmitteln mit einer Standzeit von 28 Tagen und einer Vorränkzeit von 15 Minuten erreichen die getesteten, VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel OPTISAL PLUS, OPTISAL N, CLEANISEPT, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOCEPT AF und DESCOCEPT FORTE aus dem Hause Dr. Schumacher eine Vorränkzeit von nur 15 Minuten und eine auf 42 Tage verlängerte Standzeit des befüllten Systems.



## one system basic

Einweg Vliestuchspendersystem zur Befüllung mit Desinfektionsmittel

### Anwendungshinweise

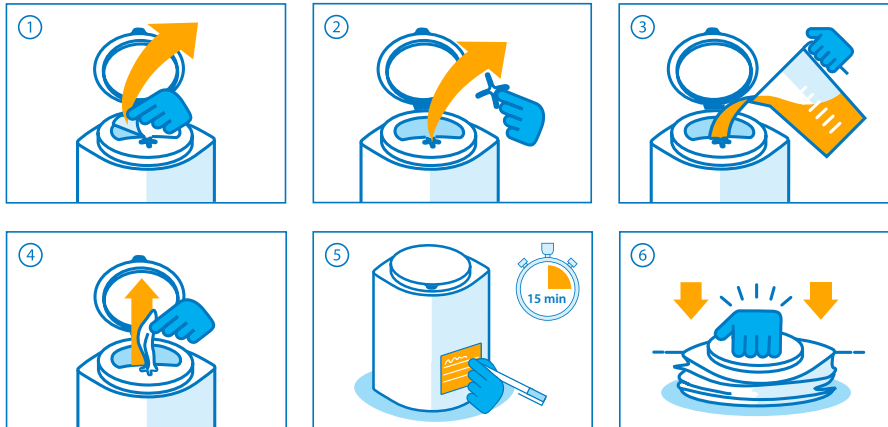

### Anwendungsgebiete

Einweg Vliestuchspendersystem zur Tränkung, hygienischer Aufbewahrung und Anwendung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar oder Flächen aller Art.

### Anwendung

Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln. Wir empfehlen die folgenden Produkte, bei deren korrekter Handhabung eine Standzeit von 42 Tagen erreicht werden kann: **OPTISAL® PLUS**, **OPTISAL® N**, **BIGUANID FLÄCHE N**, **DESCOCEPT AF**, **DESCOCEPT PUR**, **DESCOCEPT FORTE**, **CLEANISEPT**.

Entnahmedeckel des Vliestuchspenders abschrauben. Mit der Oberseite auf eine saubere Fläche legen. Die bereits enthaltene Vliestuchrolle mit 2.5 L gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken. Schutzdeckel des Entnahmedeckels öffnen. Das erste Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen. Den vorderen Teil des Tuches durch die sternförmige Entnahmeöffnung im Ent-

nahmedeckel ziehen. Den Entnahmedeckel wieder aufschrauben und den Schutzdeckel schließen. Beim Verschließen der Entnahmeöffnung darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist. Das Etikett mit den Ansatzinformationen vollständig beschriften. Nach 15 Minuten Einwirkzeit sind die Tücher einsatzbereit. Das erste Tuch verwerfen.

Flächen mit den getränkten one system basic Tüchern bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Einwegsystem! Eventuelle Restflüssigkeit entsorgen, den Spender mit offenem Entnahmedeckel zusammenpressen und dem Recycling zuführen.

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Größe	Art.-Nr.
ONE SYSTEM BASIC	Spender	120 Blatt	4	17,5 x 36 cm	00-915-OSEB120
Zubehör	Wandhalter	-	1	-	00-902-OSB

