

# Wiper Bowl® Safe & Clean

## Arbeitsvorbereitung und Desinfektionstest

**Um zu gewährleisten, dass die getränkten Multitex® Wipes im Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer hygienisch und effektiv zum Einsatz kommen können, sollte die Befüllung genau nach folgendem Ablauf erfolgen:**

1. Handschuhe tragen.
2. **Multitex® Wipes** Rolle einsetzen.
3. Eimer vorsichtig mit der gewünschten Desinfektions- oder Reinigungsflüssigkeit befüllen (ca. 2 – 3 l je nach Rollengröße), bis die Tuchrolle vollständig getränkt ist.
4. Mindestens 20 – 30 Minuten einwirken lassen.
5. Präparatsname, Ansatz- und Verfalldatum auf mitgeliefertem Chargenetikett eintragen und auf den Verschlussdeckel oder Eimer aufkleben.
6. **Multitex® Wipes** aus der Mitte der Rolle durch die sternförmige Deckelöffnung ziehen und Schutzdeckel fest schließen.
7. Der **Wiper Bowl® Safe & Clean** ist nun bis zu 4 Wochen (28 Tage) einsatzbereit, in Abhängigkeit vom verwendeten Desinfektionsmittel.
8. Nach Entnahme der Tücher ist darauf zu achten, dass der Deckel sicher verschlossen wird, um ein Austrocknen der Tücher zu vermeiden.

**Wiederbefüllung des Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimers: Langfristiger und hygienischer Einsatz durch die Möglichkeit der manuellen und/oder maschinellen Aufbereitung.**

Entsorgen Sie die Flüssigkeit und (wenn vorhanden) die Restrolle auf vorgeschriebene Weise.

### Manuelle Aufbereitung:

- Den Spendereimer und Deckel mit heißem Trinkwasser gründlich aus- bzw. abspülen und anschließend abtrocknen.
- Anschließend erfolgt eine Wischdesinfektion aller Oberflächen mit einem geeignetem Flächendesinfektionsmittel. Alle Oberflächen müssen vollständig benetzt sein.

### Maschinelle Aufbereitung:

- Der bedruckte Spendereimer kann im RDG thermisch aufbereitet werden.
- Das leicht abziehbare Chargenetikett hinterlässt keine Klebereste.

Lassen Sie den gereinigten Eimer vor nochmaliger Befüllung trocknen. Verfahren Sie gemäß der Schritte 1 – 8.



Art. Nr. 60995-00

Art. Nr. 60997-00

## Multitex® Wipes – Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgaben bestätigt

Ein unabhängiges Prüfinstitut hat in einem Test mit verschiedenen Desinfektionsmitteln nachgewiesen, dass es mit **Multitex® Wipes** nicht zu einer Beeinträchtigung der Desinfektionsmittelwirksamkeit kommt. Das entsprechende Gutachten liegt vor. Die Desinfektionsleistung ist auch nach einer Standzeit von 4 Wochen (28 Tagen) noch gewährleistet.

Mit den nachfolgend genannten Produkten konnte eine Kompatibilität nach den VAH-Richtlinien zu unseren **Multitex® Wipes** Rollen belegt werden (Einwirkzeit 60 Minuten, Konzentration 0,50 %):

Desinfektionsmittel							
	<b>Antifect Extra</b>		<b>Pursept AF</b>		<b>Terralin protect</b>		<b>Kohrsolin FF</b>
	<b>Incidin Rapid</b>		<b>Incidin Extra N</b>		<b>Incidin Plus</b>		

## Für die Wiper Bowl Safe® & Clean Spendereimer sind folgende Multitex® Wipes Rollen geeignet:

- Multitex® Wipes Eco Rolle groß**  
 Vliestuchrolle, 100 % PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselfrei und einzelverpackt, weiß, fein gelocht, 100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm, VE = 8 Rollen  
**Art.-Nr. 11829-05**
- Multitex® Wipes Premium Rolle schlank**  
 Vliestuchrolle, 100 % PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselfrei und einzelverpackt, weiß, glatt, 100 Abrisse à ca. 18 x 38 cm, VE = 6 Rollen  
**Art.-Nr. 11842-00**
- Multitex® Wipes Premium Rolle groß**  
 Vliestuchrolle, 100 % PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselfrei und einzelverpackt, weiß, glatt, 110 Abrisse à ca. 24 x 32 cm, VE = 6 Rollen  
**Art.-Nr. 11843-00**



(Auszug aus unserem Lieferprogramm)

Ihr Partner für ZVG-Qualitätsprodukte: