

ReadyWrap™ für den Arm

Kompressions-System

REF 104502 - 104525

Mai 2018

1. Zusammensetzung der Anwendungsform

Der ReadyWrap™ für den Arm besteht aus:

- Nylon
- Polyurethan
- Elasthan

Das Produktdatenblatt ist für folgenden Artikel gültig:

REF	Product designation	Size	Length	Color
104502	ReadyWrap™	Large	43 cm	Beige
104503	ReadyWrap™	Large	43 cm	Schwarz
104504	ReadyWrap™	Large	46 cm	Beige
104505	ReadyWrap™	Large	46 cm	Schwarz
104506	ReadyWrap™	Large	49 cm	Beige
104507	ReadyWrap™	Large	49 cm	Schwarz
104508	ReadyWrap™	Medium	43 cm	Beige
104509	ReadyWrap™	Medium	43 cm	Schwarz
104510	ReadyWrap™	Medium	46 cm	Beige
104511	ReadyWrap™	Medium	46 cm	Schwarz
104512	ReadyWrap™	Medium	49 cm	Beige
104513	ReadyWrap™	Medium	49 cm	Schwarz
104514	ReadyWrap™	Small	43 cm	Beige
104515	ReadyWrap™	Small	43 cm	Schwarz
104516	ReadyWrap™	Small	46 cm	Beige
104517	ReadyWrap™	Small	46 cm	Schwarz
104518	ReadyWrap™	Small	49 cm	Beige
104519	ReadyWrap™	Small	49 cm	Schwarz
104520	ReadyWrap™	X-Large	43 cm	Beige
104521	ReadyWrap™	X-Large	43 cm	Schwarz
104522	ReadyWrap™	X-Large	46 cm	Beige
104523	ReadyWrap™	X-Large	46 cm	Schwarz
104524	ReadyWrap™	X-Large	49 cm	Beige
104525	ReadyWrap™	X-Large	49 cm	Schwarz

2.1 Grundpackung / Unit Container

- see 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Stück = 1 PE-Flachbeutel mit Druckverschluss, transparent
1 Gebrauchsanweisung aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

10 Stück = 1 Wellfaltkiste, bestehend aus Zellulose

3. Herstellung

ReadyWrap™ wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

ReadyWrap™ Kompressions-Systeme können mit Velcro Klettverschlüssen individuell angepasst werden. Sie wurden entwickelt um die Kompressionstherapie für Patienten mit venösen oder Lymphatischen Krankheiten einfacher zu machen.

5. Eigenschaften

- Unterschiedlich farblich gekennzeichnete Bänder erleichtern das Anlegen
- Flache Konstruktion der Bänder ermöglicht z.B. das Tragen der eignen Schuhe
- Bänder mit 50%iger Überlappung* – zur Reduktion und Kontrolle von Ödemen
- Passformgenaues Design – für optimalen Sitz
- Kurzzug-Eigenschaften – therapeutisch wirksamer Arbeitsdruck und gut verträglicher Ruhedruck
- Der zusätzlich angebrachte Innenärmel ermöglicht das einfache Anlegen und Abnehmen mit einer Hand
- Die Polsterung im Bereich des Handgelenks- und des Ellbogengelenks verhindert Druckstellen und bietet zusätzlichen Komfort
- Für den rechten und den linken Arm verwendbar

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Kompressions-System für phlebologische und lymphologische Indikationen, d.h. bei Venenerkrankungen, chronischen Ödemen und Lymphödemen. Zur Reduktion oder Aufrechterhaltung des Umfangs und der Form der oberen und unteren Gliedmaßen.

7. Zuordnung / Klassifizierung

ReadyWrap™ ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I.
(Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG, Anhang IX)

8. Biologische Bewertung und Biokompatibilität

Generell werden die Materialien des ReadyWrap™ im Kompressionsbereich seit Jahren verwendet. Bei korrekter Anwendung des Produktes auf intakter Haut ist dieses sicher.

Es besteht kein bekanntes Risiko bei der Verwendung des Medizinprodukts ReadyWrap™. Es wurde so entworfen, hergestellt und verpackt, dass es weder den klinischen Zustand und die Sicherheit des Patienten, noch die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders oder Dritter gefährdet, insofern es innerhalb der Zweckbestimmung und der Indikationen verwendet wird.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit des ReadyWrap™ für den Arm 5 Jahre.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.



Dr. Klemens Schulz
Director Global Portfolio Management