

# ReadyWrap™ für den Unterschenkel

## Kompressions-System

REF 104442 – 104457, 104784 - 104787

Mai 2018

### 1. Zusammensetzung der Anwendungsform

Der ReadyWrap™ für den Unterschenkel besteht aus:

- Nylon
- Polyurethan
- Elasthan

Das Produktdatenblatt ist für folgenden Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Größe	Länge	Farbe
104442	ReadyWrap™	Large	30 cm	Beige
104443	ReadyWrap™	Large	30 cm	Schwarz
104444	ReadyWrap™	Large	35 cm	Beige
104445	ReadyWrap™	Large	35 cm	Schwarz
104446	ReadyWrap™	Medium	30 cm	Beige
104447	ReadyWrap™	Medium	30 cm	Schwarz
104448	ReadyWrap™	Medium	35 cm	Beige
104449	ReadyWrap™	Medium	35 cm	Schwarz
104450	ReadyWrap™	Small	30 cm	Beige
104451	ReadyWrap™	Small	30 cm	Schwarz
104452	ReadyWrap™	Small	35 cm	Beige
104453	ReadyWrap™	Small	35 cm	Schwarz
104454	ReadyWrap™	X-Large	30 cm	Beige
104455	ReadyWrap™	X-Large	30 cm	Schwarz
104456	ReadyWrap™	X-Large	35 cm	Beige
104457	ReadyWrap™	X-Large	35 cm	Schwarz
104784	ReadyWrap™	XX-Large	30 cm	Beige
104785	ReadyWrap™	XX-Large	30 cm	Schwarz
104786	ReadyWrap™	XX-Large	35 cm	Beige
104787	ReadyWrap™	XX-Large	35 cm	Schwarz

## 2.1 Grundpackung / Unit Container

- see 2.2

## 2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Stück = 1 PE-Flachbeutel mit Druckverschluss, transparent  
1 Gebrauchsanweisung aus Zellulose

## 2.3 Versandpackung / Transit Container

10 Stück = 1 Wellfalkiste, bestehend aus Zellulose

## 3. Herstellung

ReadyWrap™ wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

## 4. Beschreibung

ReadyWrap™ Kompressions-Systeme können mit Velcro Klettverschlüssen individuell angepasst werden. Sie wurden entwickelt um die Kompressionstherapie für Patienten mit venösen oder Lymphatischen Krankheiten einfacher zu machen.

## 5. Eigenschaften

- Unterschiedlich farblich gekennzeichnete Bänder erleichtern das Anlegen
- Flache Konstruktion der Bänder ermöglicht z.B. das Tragen der eignen Schuhe
- Bänder mit 50%iger Überlappung\* – zur Reduktion und Kontrolle von Ödemen
- Passformgenaues Design – für optimalen Sitz
- Kurzzug-Eigenschaften – therapeutisch wirksamer Arbeitsdruck und gut verträglicher Ruhedruck
- Kann in Kombination mit Kompressionsstrümpfen für mehr Halt und Schutz getragen werden.
- Die Fixierung auf der Rückseite reduziert die Dehnung im hinteren Bereich und verbessert den Halt des ReadyWrap.
- Überlappt den Ready Wrap für den Fuß und das Knie und sorgt für eine vollständige Abdeckung

## 6. Zweckbestimmung / Anwendung

Kompressions-System für phlebologische und lymphologische Indikationen, d.h. bei Venenerkrankungen, chronischen Ödemen und Lymphödemen. Zur Reduktion oder Aufrechterhaltung des Umfangs und der Form der oberen und unteren Gliedmaßen.

## 7. Zuordnung / Klassifizierung

ReadyWrap™ ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I.  
(Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG, Anhang IX)

## 8. Biologische Bewertung und Biokompatibilität

Generell werden die Materialien des ReadyWrap™ im Kompressionsbereich seit Jahren verwendet. Bei korrekter Anwendung des Produktes auf intakter Haut ist dieses sicher.

Es besteht kein bekanntes Risiko bei der Verwendung des Medizinprodukts ReadyWrap™. Es wurde so entworfen, hergestellt und verpackt, dass es weder den klinischen Zustand und die Sicherheit des Patienten, noch die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders oder Dritter gefährdet, insofern es innerhalb der Zweckbestimmung und der Indikationen verwendet wird.


## 9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit des ReadyWrap™ für den Unterschenkel 5 Jahre.

## 10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.  
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
D-56579 Rengsdorf  
ppa.

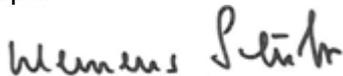

Dr. Klemens Schulz  
Director Global Portfolio Management