



GERMANY

www.herenz.de

Code 1091350

Diagnostikleuchte

Bedienungsanleitung

Zum Betrieb der Diagnostikleuchte den Clip auf der Rückseite des Gehäuses gedrückt halten. Nach dem Loslassen ist die Diagnostikleuchte ausgeschaltet.

Austausch der Glühlampe

Schrauben Sie die Diagnostikleuchte auf und entnehmen Sie die Batterien. Danach kann die Glühlampe problemlos herausgenommen und ersetzt werden.

Einsetzen und Wechseln der Batterien

Schrauben Sie die Diagnostikleuchte auf und setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (UM4) ein. Achten Sie darauf, dass die Pluspole [+] zur Glühbirne hin ausgerichtet sind.

LOT

