

Bechtozid plus

Anwendungsbereich

Pumpspray für die schnelle Flächendesinfektion aller alkoholresistenten Medizinprodukte, z.B. Behandlungsstühle, Behandlungseinheiten ect. Besonders geeignet für die optimale Hygiene bei Patientenwechsel. Materialschonend (Röhm-Test: 12/2006). Gelistet bei der VAH.

Anwendung

Bechtozid plus vom Körper weg auf ein sauberes Tuch sprühen und damit die kontaminierte Oberfläche abwischen. Auf vollständige Benetzung und Einwirkzeiten achten.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute (EN 13727 / 13624)
- wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 5 Minuten (EN 14348)
- getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand: 04/2015) und gelistet bei der VAH
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia -Viren in 1 Minute
- materialschonend (Röhm-Test: 12/2006)
- phenol- und aldehydfrei
- parfümfrei oder mit frischem Citrusduft
- pH-Wert: <10,0



Zusammensetzung

100 g Bechtozid plus enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-C16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammoniumchlorid
- 250 mg C12-C14[(ethylphenyl)methyl]di-methyl-Chlorid
- 20 g Ethanol
- 10 g 1-Propanol

Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
EG Zertifikat: HD 1388483-1,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg

Lieferform

REF 544 Flasche mit 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Lemon Duft, wieder befüllbar

REF 544.5 Kanister mit 5 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Lemon Duft

REF 544.10 Kanister mit 10 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Lemon Duft

Zubehör

REF 544.SP Sprühkopf für 1 Liter Flasche

REF 567.5 Dosierpumpe für 5 und 10 Liter Kanister

REF 567.51 Ausgießer für 5 und 10 Liter Kanister



Hersteller

Alfred Becht GmbH,
Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg,
Tel.: +49 781 60586-0,
Fax.: +49 781 60586-40,
www.alfredbecht.de