




## FLEX

Attends Flex sind ein Sortiment von saugfähigen Slips mit einem flexiblen Gürtelsystem. Attends Flex sind bei starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet.


### Anlegehinweise

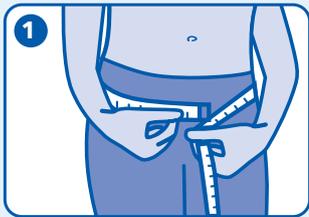


1 Messen Sie den Bauch- und den Hüftumfang und nehmen Sie den größeren der beiden Werte. Wählen Sie damit die richtige Produktgröße aus.



2 Falten Sie das Produkt vollständig auseinander - auch den Hüftgürtel. Die bedruckte Seite kommt nach außen.

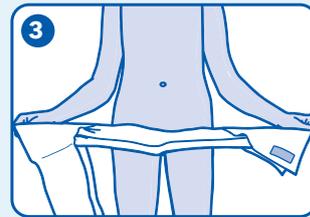

3 Formen Sie das Produkt vorsichtig in Längsrichtung zu einem Schiffchen, so dass sich die Auslaufsperrn aufrichten.

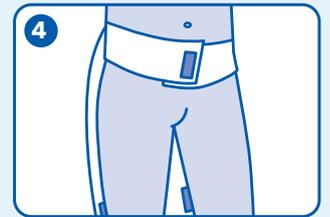


4 Legen Sie den Hüftgürtel um die Taille/Hüfte. Fixieren Sie den Gürtel mit dem Klettverschluss vorne und drücken Sie ihn gut an.



5 Ziehen Sie den saugenden Teil vorsichtig nach vorne, halten Sie ihn dabei in Längsrichtung gefaltet und mit aufgerichteten Auslaufbarrieren. Legen Sie das Produkt eng in den Leisten an.



6 Streichen Sie das Produkt glatt und kletten Sie es am Hüftgürtel fest. Drücken Sie dabei auf die blauen Klettflächen, damit es richtig hält.

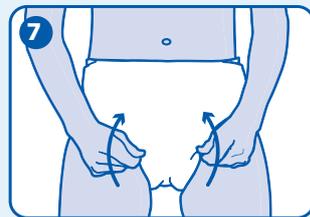

7 Falls nötig korrigieren Sie nochmals, bis das Produkt auch in den Leisten eng anliegt und nicht nach innen geklappt ist.

## FLEX

### Hinweise und Tipps

#### Auswahl

- Wählen Sie die richtige Größe der Attends Flex entsprechend Ihres Bauch- oder Hüftumfangs. Nehmen Sie dabei den größeren der beiden Werte.
- Wählen Sie die Saugstärke entsprechend der Flüssigkeitsausfuhr. Versuchen Sie es zunächst mit einer kleineren Saugstärke. Falls diese nicht ausreicht, gehen Sie zur nächsthöheren Saugstärke.

#### Anlegen

- Falten Sie das Produkt komplett auseinander und formen Sie es in Längsrichtung zu einem Schiffchen. Dann erst legen Sie den Hüftgürtel an.
- Der Gürtel kommt nach hinten. Er wird von hinten nach vorne angelegt und fixiert.
- Achten Sie darauf, dass der Nässeindikator mittig (in Verlängerung zur Wirbelsäule) sitzt.
- Drücken Sie die Klettstreifen beim Verschließen sorgfältig an.
- Das Produkt kann auch im Liegen angelegt werden. Dann wie oben beschrieben vorgehen.

#### Wechseln

- Prüfen Sie den Nässeindikator. Wenn der Nässeindikator bis auf eine Handbreit am oberen Rand verschwommen ist oder wenn Stuhl enthalten ist, sollte das Produkt gewechselt werden. Falls er weniger stark verschwommen ist und kein Stuhl enthalten ist, kann das Produkt weiter verwendet werden.
- Wenn das Produkt noch sauber und trocken ist, kann es nach dem Toilettengang erneut angelegt werden.
- Gebrauchte Produkte immer von vorne nach hinten ausziehen, um Keimverschleppung zu vermeiden.
- Bei der Intimhygiene reinigen Sie den Intimbereich ebenfalls immer von vorne nach hinten.

#### Bei Auslaufproblemen

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Saugstärke verwenden und das Produkt korrekt angelegt ist.
- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Größe verwenden.

#### Entsorgung

- Rollen Sie das ausgelastete und/oder verschmutzte Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Bitte auf keinen Fall über die Toilette entsorgen: Verstopfungsgefahr. Inkontinenzprodukte gehören nicht in den Verpackungsmüll und nicht in den Biomüll.



**Hautverträglichkeit**  
bestätigt von SGS  
proderm GmbH, Institut für  
dermatologische Forschung  
und Prüfung. Getestet im  
Auftrag von Attends