



Artikelnummer 1999915798



Slip, ABENA Slip, XXL2, Farbcode Lila, Premium

- ✓ Atmungsaktive Rückseite für ein gesundes Hautgleichgewicht
- ✓ Top-Dry-Technologie für eine trockene Oberfläche zum Schutz der Haut
- ✓ Flexible Seitenteile für eine einfache und optimale Passform
- ✓ Auslaufbarrieren für zusätzlichen Schutz
- ✓ Nässeindikator
- ✓ Geruchsbinder



Produktbeschreibung

ABENA Slip XXL ist unser Inkontinenzslip für mittlere bis schwere Inkontinenz und für Menschen mit einem Hüftumfang bis 254 cm konzipiert. Die flexiblen Seitenteile mit mehrfach verschließbaren Klettverschlüssen ermöglichen eine optimale Passform. Die Produkte sind vollständig atmungsaktiv und verfügen über die Top-Dry-Technologie für optimalen Komfort und Schutz vor Hautirritationen. Sie verfügen außerdem über seitliche hohe Auslaufbarrieren für einen sicheren Auslaufschutz. Das Geruchskontrollsystem minimiert unangenehme Gerüche. Der als Nässeindikator fungierende Tintenaufdruck erleichtert Benutzern und Pflegepersonen das Erkennen des richtigen Produktwechsels. Durch die Anzeige der Produktauslastung kann leichter der benötigte Absorptionsgrad ermittelt werden.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Slip
Marke	ABENA
Produktserie	Slip
Größe	XXL2
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Farbcode Lila
Material	ECF-Fluff, PE, Textilähnliche Unterschicht (TBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	1030 mm
Breite	750 mm
Hüftumfang	170-254
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	3200 ml
Geschlecht	Unisex
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE, MD, UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	18779923
PZN Karton	18779946
Sicherheitshinweise und Warnungen	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Haltbarkeit	5 Jahre

Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Inkontinenzslips für mittlere bis schwere Inkontinenz. Es ist wichtig, immer den Hüftumfang zu messen, um die richtige Größe auszuwählen und die richtige Saugstärke zu wählen, um ein Auslaufen zu vermeiden. Falten Sie den Slip der Länge nach mit der Rückseite nach außen, so dass eine Schalenform entsteht. Geben Sie den Slip von vorne nach hinten weiter. Das Produkt vorne ausbreiten und zwischen den Beinen kanalförmig anlegen. Befestigen Sie die Klettverschlüsse auf beiden Seiten für einen sicheren und bequemen Sitz. Einfache Erkennung der Produktgröße anhand von Farbcode, Name und Nummerierungssystem.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	40 Stck	44 cm	37.9 cm	30.4 cm	5703538486036
pckg	10 Stck	22.9 cm	18.2 cm	28.8 cm	5703538486029
Stck	1 Stck				



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Die elastischen Bündchen erleichtern das Anziehen. Das Produkt passt sich der Körperform an und sitzt sicher.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Wirksame, sichtbare und unsichtbare Auslaufbarrieren und latexfreie Bündchen sorgen für einen guten Sitz, wodurch sich die Gefahr von Auslaufen verringert.



Der Nässeindikator ist ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der die Farbe ändert oder verblasst und dadurch anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Die Oberfläche des 100 % atmungsaktiven Produkts mit Auslaufschutz bleibt dank Top-Dry-Funktion auch nach mehreren Entleerungen der Blase trocken. Dies trägt zum Aufrechterhalt des natürlichen pH-Werts der Haut und somit zu deren Gesundheit bei.



Das Produkt ist latexfrei.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 9 Tropfen.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Die Verpackung besteht zu 30% aus PCR-Material, d. h. aus vom Verbraucher bereits verwendeten Kunststoffen. So können wir unseren Plastikmüll reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.

